

GUIA DE LIMPEZA PARA ENDOSCÓSCÓPIOS GASTROINTESTINAIS

Endoscópios Séries EXERA II (180) e EXERA III (190)

VOLUMES DE SOLUÇÕES DE REPROCESSAMENTO

Etapa	Ação	Canal	Série 190*	Série 180*
Pré-limpeza (Ao lado da maca)	Aspirar água/ar	Canal de sucção	10 segundos ou mais (água) [‡] 10 segundos (ar)	30 segundos (água) 10 segundos (ar)
	Injetar água e ar no canal de ar/água	Canal de ar/água	10 segundos ou mais (água) 10 segundos ou mais (ar)	30 segundos (água) 10 segundos (ar)
	Injetar água/detergente no canal de água auxiliar	Canal auxiliar de água	30 ml (água) N/A	30 ml (água) Ar (sem quantidade especificada)
Limpeza manual	Aspire o canal de biópsia e o canal de sucção com detergente	Canal de biópsia e Canal de sucção	30 segundos (solução detergente) com bomba de sucção	30 segundos (solução detergente) com bomba de sucção
	Lave o canal de ar/água com detergente	Canal de ar/água	90 ml (solução detergente)	90 ml (solução detergente)
	Lave o canal auxiliar de água com detergente	Canal auxiliar de água	30 ml (solução detergente)	90 ml (solução detergente)
	Remova a solução detergente de todos os canais	Canal de sucção Canal de ar/água Canal auxiliar de água	90 ml (água) 90 ml (água) 30 ml (água)	90 ml (água) 90 ml (água) 90 ml (água)
	Injete ar em todos os canais	Canal de sucção Canal de ar/água Canal auxiliar de água	90 ml (ar) 90 ml (ar) 30 ml (ar)	90 ml (ar) 90 ml (ar) 90 ml (ar)
Desinfecção manual	Lave todos os canais com solução desinfetante	Canal de sucção Canal de ar/água Canal auxiliar de água	90 ml (solução desinfetante) 90 ml (solução desinfetante) 60 ml (solução desinfetante)	90 ml (solução desinfetante) 90 ml (solução desinfetante) 90 ml (solução desinfetante)
	Injete ar em todos os canais enquanto o endoscópio estiver totalmente imerso e, em seguida, retire o endoscópio da solução desinfetante	Canal de sucção Canal de ar/água Canal auxiliar de água	90 ml (ar) 90 ml (ar) 30 ml (ar)	90 ml (ar) 90 ml (ar) 90 ml (ar)
Enxágue	Enxágue todos os canais com água	Canal de sucção Canal de ar/água Canal auxiliar de água	90 ml (água) 90 ml (água) 30 ml (água)	90 ml (água) 90 ml (água) 90 ml (água)
	Injete ar em todos os canais	Canal de sucção Canal de ar/água Canal auxiliar de água Canal de sucção	90 ml (ar) 90 ml (ar) 30 ml (ar) 15 segundos (ar) com bomba de sucção	90 ml (ar) 90 ml (ar) 90 ml (ar) 15 segundos (ar) com bomba de sucção
	Injete álcool	Canal de sucção Canal de ar/água Canal auxiliar de água	90 ml (álcool) 30 ml (álcool) 30 ml (álcool)	90 ml (álcool) 90 ml (álcool) 90 ml (álcool)
	Injete ar	Canal de sucção Canal de ar/água Canal auxiliar de água	90 ml (ar) 90 ml (ar) 30 ml (ar)	90 ml (ar) 90 ml (ar) 90 ml (ar)
		Canal de sucção	30 segundos (ar) com bomba de sucção	N/A

*Esta tabela é apenas um resumo de informações retiradas dos Manuais de Reprocessamento dos endoscópios GIF e CF das linhas 180 e 190. Estas informações não substituem a leitura e compreensão destes documentos.

‡ O destaque indica alterações das instruções de reprocessamento em relação às anteriores.